



Wartix®



Instrukcja użycia środka do usuwania kurczajek.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia.

• Produkt należy stosować tylko zgodnie ze wskazówkami.

• Użycie produktu niezgodnie z instrukcją może spowodować odmrożenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA WARTIX®

- 1 szt. dozownik z trwale zamocowanym aplikatorem zawierającym 38 ml eteru dimetylowego
- 1 szt. instrukcja użycia
- 8 szt. plastrów ochronnych
- 16 szt. gazików oczyszczających

OPIS PRODUKTU

WARTIX® środek do usuwania kurczajek (brodawek) to produkt kriochirurgiczny do leczenia kurczajek zwykłych, kurczajek podeszwowych, które są obecne na rękach i stopach oraz guzków mięczaka zakaźnego (*Molluscum Contagiosum*). Można je usuwać metodą wymrażania (krioterapii).

IDENTYFIKACJA KURZAJEK ZWYKŁYCH I PODESZWOWYCH

Kurczajki to wyrosła skórne powstające w najbardziej zewnętrznej warstwie skóry, spowodowane wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Kurczajki zwykłe zazwyczaj pojawiają się na grzbietach rąk i w pobliżu paznokci; mogą także pojawiać się na łokciach i kolanach.

Kurczajki zwykłe są:

- zwykle szorstkie, twarde i mają kształt kalafiorowatej kopuły,
- zwykle nie są bolesne.

Kurczajki podeszwowe występują na spodzie, czyli na podeszwach stóp. Czasami pod powierzchnią kurczajki widoczna jest ciemna plamka. Ucisk związany ze staniem i chodzeniem spłaszcza kurczajkę podeszwową i wciska ją pod powierzchnię skóry, powodując uformowanie się nad kurczajką twardego naskórka przypominającego odcisk.

Kurczajki podeszwowe:

- mogą być bolesne, zwłaszcza gdy są umiejscowione na pięcie lub na kłębie stopy,
- mają kształt kopulasty, a pod wpływem stania/chodzenia mogą się spłaszczać.

W przypadku wątpliwości, czy dana narośl jest kurczajką, należy zasięgnąć porady medycznej.

IDENTYFIKACJA GUZKÓW MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO

Guzki mięczaka zakaźnego to perlowane, okrągłe guzki przypominające kapelusz. Są one bardzo zakaźne, a wywołuje je wirus należący do pokswirusów. Guzki mięczaka zakaźnego najczęściej umiejscawiają się na skórze rąk, twarzy i w okolicach narządów płciowych. Wielkość guzków waha się od 1 mm do 8 mm.

WSKAZANIA/PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do usuwania kurczajek na rękach i stopach oraz guzków mięczaka zakaźnego (*Molluscum Contagiosum*). Produkt przeznaczony jest do użytku jako produkt dostępny bez recepty (OTC), dla osób w wieku powyżej 4 lat.

PRZECIWSKAZANIA

Produktu WARTIX® nie wolno stosować w następujących przypadkach:

- w przypadku rozpoznania choroby nowotworowej i/lub jej leczenia, aktualnie lub w przeszłości,
- w przypadku brodawek narządów płciowych,
- w przypadku skóry ciemnej lub o intensywnej pigmentacji,

Wartix®



Nie wolno stosować produktu w przypadku uszkodzeń dozownika lub opakowania.

• Wyłącznie do użytku zewnętrznego. • Produkt przeznaczony wyłącznie do usuwania kurczajek na rękach i stopach oraz guzków mięczaka zakaźnego.

- w przypadku znamion wrodzonych, innych znamion (w tym owłosionych), pieprzyków lub innych narośli o nietypowym wyglądzie,
- w przypadku podrażnienia lub zapalenia skóry lub w przypadku obecności egzemy,
- w obrębie twarzy,
- we wrażliwych okolicach skóry, tj. w obrębie szyi, pach, piersi i pośladków,
- w przypadku nieznanymi zaburzeń skóry i w przypadku wątpliwości, czy dana zmiana skórna jest kurczajką,
- w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na skrajnie niskie temperatury (pokrywką wywoływana przez zimno),
- u osób chorujących na cukrzycę i osób z zaburzeniami krążenia (choroba Raynauda),
- u osób przyjmujących leki immunosupresyjne oraz w przypadku potwierdzonego rozpoznania choroby autoimmunologicznej/kolagenozy,
- u osób zakażonych wirusem HIV,
- u osób przyjmujących leki przeciwkrzepliwie i u osób chorujących na hemofilię,
- u dzieci w wieku poniżej 4 lat,
- w skojarzeniu z innymi kuracjami przeznaczonymi do leczenia brodawek.

OSTRZEŻENIA/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Niebezpieczeństwo

- Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzewanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Nie palić tytoniu w pobliżu dozownika.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po zużyciu.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Unikać kontaktu z oczami. Nie rozpylać na oczy, ponieważ może to spowodować odmrożenie i ślepotę.
- Jedną kurczajkę można wymrażać maksymalnie cztery razy, przy czym należy zachować 14-dniowy odstęp czasu pomiędzy kolejnymi zabiegami. Jeżeli po czterech próbach kurczajka nie odpadnie, najlepiej zgłosić się do lekarza.
- Produkt stosowany niezgodnie z niniejszą instrukcją użycia może spowodować odmrożenie, depigmentację skóry lub powstanie blizny.
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem WARTIX® powinny skonsultować się z lekarzem.



Wartix®



Instrukcja użycia środka do usuwania kurczajek.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia.

• Produkt należy stosować tylko zgodnie ze wskazówkami.

• Użycie produktu niezgodnie z instrukcją może spowodować odmrożenia.

SPOSÓB UŻYCIA W PRZYPADKU KURZAJEK ZWYKŁYCH I PODESZWOWYCH

Środki ostrożności: Nie usuwać z dozownika trwale przymocowanego aplikatora.

Wielkość kurczajki	Liczba naciśnięć dna dozownika
Małe brodawki < 3 mm	3x
Brodawki średniej wielkości (od 3 mm do 5 mm)	4x
Duże brodawki > 6 mm	5x



1. Powierzchnię, na której znajduje się kurczajka, skierować ku górze. Okrągły otwór aplikatora umieścić bezpośrednio nad kurczajką, tak aby zmieściła się w komorze aplikatora. Upewnić się, że brzozy aplikatora szczelnie przylegają do skóry wokół kurczajki.



Dozownik z aerozolem należy trzymać pionowo, przechylając pod kątem maksymalnie 30° w celu zwiększenia skuteczności działania.



2. Przytrzymać dozownik nad kurczajką. Mocno nacisnąć kciukiem dno dozownika od 3 do 5 razy, w zależności od wielkości kurczajki (patrz tabela powyżej).

Przytrzymać aplikator na kurczajce przez co najmniej 10 sekund. Może pojawić się biała aureola szerokości 2 mm. Po wyschnięciu miejsca aplikacji pojawi się niewielka blizna, która wygoi się w ciągu nadchodzących dni lub tygodni.

3. Zdjąć aplikator z kurczajki. Bezpośrednio po aplikacji można odczuwać nadwrażliwość skóry lub mrowienie.

4. Po każdym użyciu otwór aplikatora należy przemyć gazikiem oczyszczającym, aby ograniczyć ryzyko przeniesienia zakażenia.

5. Jeżeli po zastosowaniu WARTIX® kurczajka jest uniesiona i/lub bardzo wrażliwa, można zakleić ją plasterem ochronnym znajdującym się w zestawie.

Środki ostrożności:

1. W przypadku grupy kurczajek zlokalizowanych blisko siebie, każdą z nich należy leczyć osobno w odstępach 14 dni między kolejnymi aplikacjami.

2. W większości przypadków do usunięcia kurczajki wystarczy pojedyncza aplikacja. W przypadku uporczywych kurczajek należy powtórzyć aplikację po 10 sekundach.

Jeżeli kurczajka nie zostanie usunięta w ciągu 14 dni od wymrażania, należy powtórzyć aplikację zgodnie z niniejszą instrukcją użycia.


SPOSÓB UŻYCIA W PRZYPADKU GUZKÓW MIĘCZAKA ZAKAŻNEGO

Środki ostrożności: Nie usuwać z dozownika trwale przymocowanego aplikatora.

Ostrzeżenie: Preparat należy stosować na jeden guzek i odczekać 24 godziny przed kolejną aplikacją, aby sprawdzić, czy nie występuje nadwrażliwość. Nie należy stosować leczenia więcej niż dwóch guzków dziennie.



1. Powierzchnię, na której znajduje się guzek, skierować ku górze. Okrągły otwór aplikatora umieścić bezpośrednio nad guzkiem, tak aby zmieścił się w komorze aplikatora. Upewnić się, że brzozy aplikatora szczelnie przylegają do skóry wokół guzka.

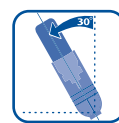

Dozownik z aerozolem należy trzymać pionowo, przechylając pod kątem maksymalnie 30° w celu zwiększenia skuteczności działania.



Nie wolno stosować produktu w przypadku uszkodzeń dozownika lub opakowania.

• Wyłącznie do użytku zewnętrznego. • Produkt przeznaczony wyłącznie do usuwania kurczajek na rękach i stopach oraz guzków mięczaka zakaźnego.



2. Przytrzymać dozownik nad guzkiem. Trzykrotnie przycisnąć dno dozownika kciukiem, aby uwolnić płyn zamrażający.

Przytrzymać aplikator na guzku przez co najmniej 5 sekund. Może pojawić się biała aureola szerokości 2 mm. Po wyschnięciu miejsca aplikacji pojawi się niewielka blizna, która wygoi się w ciągu nadchodzących dni lub tygodni.

3. Zdjąć aplikator z guzka. Bezpośrednio po aplikacji można odczuwać nadwrażliwość skóry lub mrowienie.

4. Po każdym użyciu otwór aplikatora należy przemyć gazikiem oczyszczającym, aby ograniczyć ryzyko przeniesienia zakażenia.

5. Jeżeli po zastosowaniu WARTIX® guzek jest bardzo wrażliwy, można zakleić go plasterem ochronnym znajdującym się w zestawie.

Środki ostrożności:

1. W przypadku grupy guzków mięczaka zakaźnego zlokalizowanych blisko siebie, każdy guzek należy leczyć osobno. Odczekać 1 minutę pomiędzy kolejnymi aplikacjami, aby aplikator osiągnął temperaturę pokojową. Nie należy stosować leczenia więcej niż dwóch guzków dziennie.

2. Jeżeli guzek nie zostanie usunięty w ciągu 14 dni od wymrażania, należy powtórzyć aplikację zgodnie z niniejszą instrukcją użycia.

PO LECZENIU

- Po zabiegu może powstać pęcherzyk. Jeżeli to nastąpi, NIE NALEŻY GO PRZEKŁUWAĆ.
- Nie skubać i nie drapać miejsca leczenia ani leczonej kurczajki.
- Należy dbać o czystość i suchość leczonego obszaru, aby uniknąć zakażenia.
- Można pływać, myć się, kąpać i brać prysznic, jak zwykle.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie przekraczać temperatury 25°C.
- Zawartość/pojemnik zutilizować zgodnie z przepisami lokalnymi.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

- Proces krioterapii może spowodować hipopigmentację (jasne plamki) lub hiperpigmentację (ciemne plamki). Objaw ten ustąpi.
- Krwawienie.
- Powstawanie pęcherzy.
- Powstawanie blizn, gdy aplikacja będzie dłuższa niż zalecana.
- Przejściowy dyskomfort, taki jak ból lub mrowienie.
- W przypadku zakażenia i/lub innych powikłań należy zasięgnąć porady medycznej.

ZAŻALENIA I WSPARCIE KLIENTA

W przypadku pytań lub w celu zgłoszenia problemu należy skontaktować się z dystrybutorem lub wejść na stronę internetową:

Infolinia: 801 808 818*

www.genexo.pl

www.nakurzajki.com.pl

* całkowity koszt połączenia w cenie 1 impulsu wg taryfy operatora

Każde poważne, niepożądane zdarzenie związane z tym wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi Royal Utermöhlen, dystrybutorowi oraz odpowiedniemu organowi nadzorcemu. Aby zgłosić problem lub otrzymać odpowiedź na pytanie, należy skontaktować się z Royal Utermöhlen lub dystrybutorem.

Royal Utermöhlen
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega,
Holandia

Dystrybutor:
Genexo Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajęczka 26,
01-510 Warszawa, Polska

CE
0344

MD

REF 140203 740181
Rev/Med/W05.2021/PL